


SOFARDRESS

MEDICAZIONE CAVITARIA

Sterile in schiuma
di poliuretano
altamente idrofila

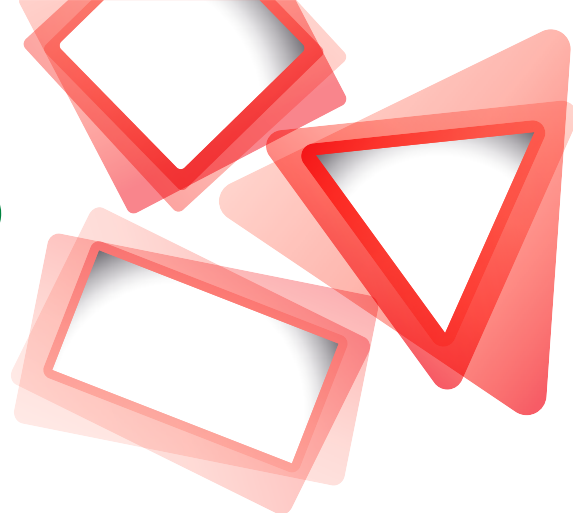

Medicazione sterile in schiuma poliuretanicata per il trattamento di ferite cavitare

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SOFARDRESS è una linea di medicazioni avanzate di nuova concezione, a base di schiuma poliuretanicata.

La membrana in schiuma poliuretanicata di **SOFARDRESS** è caratterizzata da strutture polimeriche microcellulari aperte, altamente idrofile ed estremamente soffici, con elevatissima capacità di adsorbimento dell'essudato e proprietà antiaderenti al letto della ferita e quindi in grado di lasciare intatto il tessuto di granulazione; peculiarità quest'ultima che rende atraumatica ed indolore la rimozione della medicazione al momento del ricambio.

La medicazione **SOFARDRESS CAVITARIA** si presenta come una membrana estremamente soffice, facilmente conformabile a qualsiasi tipo di lesione cavitaria. Può essere ripiegata o tagliata nelle dimensioni desiderate, più adatte per colmare la cavità della ferita. Appena viene applicata, **SOFARDRESS CAVITARIA** incomincia subito ad adsorbire essudato, conformandosi nello stesso tempo alle pareti della ferita di cui mantiene comunque idratata la superficie, creando inoltre un microambiente caldo-umido ad ossigenazione costante, ideale per accelerare il processo di rigranulazione cellulare. L'impiego di **SOFARDRESS CAVITARIA** riduce anche il rischio che si formino accessi. **SOFARDRESS CAVITARIA** drena selettivamente l'essudato, concentrando nel letto delle lesioni i fattori naturali nutritivi, utili per la rigranulazione cellulare. La linea **SOFARDRESS CAVITARIA** presenta medicazioni in due formati (10x10 cm e 10x20 cm) con membrana di spessore 4 mm.

INDICAZIONI

SOFARDRESS CAVITARIA svolge una specifica funzione complementare nei processi di cicatrizzazione finalizzata al trattamento locale delle ferite cavitare acute e croniche con elevato e scarso essudato.

SOFARDRESS CAVITARIA può anche essere usata nel trattamento di ferite infette o con rischio di infezione, sotto la supervisione del medico. Inoltre l'uso di **SOFARDRESS CAVITARIA** in combinazione con un gel aiuta lo sbrigliamento autolitico dei tessuti necrotici.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della ferita e applicazione della medicazione

- 1) Preparare la ferita seguendo un protocollo standard o secondo le istruzioni del medico.
- 2) Detergere la ferita mediante irrigazione con una soluzione salina sterile, usando per esempio SOFARCLEAN. Ove necessario rimuovere dalla lesione il materiale estraneo, i detriti cellulari e il tessuto devitalizzato mediante strumenti idonei, oppure con l'aiuto dell'azione meccanica di un getto di soluzione fisiologica sterile, come quello prodotto, per esempio, con la bomboletta pressurizzata di SOFARCLEAN.
- 3) Asciugare accuratamente la cute integra circostante la ferita, senza toccare la cute lesa. Ove necessario, radere i peli intorno alla ferita.
- 4) Scegliere una quantità di **SOFARDRESS CAVITARIA** adatta a colmare la cavità della ferita.

- 5) Introdurre delicatamente nella cavità della ferita la membrana ritagliata o ripiegata, in modo da colmare gli spazi liberi, ma senza esercitare alcuna compressione della membrana.
- 6) Applicare poi sopra la ferita cavitaria una medicazione complementare di copertura, **SOFADRESS ADESIVA** oppure **SOFADRESS NON ADESIVA**, con l'accorgimento di consentire che il dorso sia ispezionabile al fine di accertare il grado di saturazione dell'essudato, e stabilire in tal modo il momento del cambio della medicazione, esterna e cavitaria.

RIMOZIONE E RICAMBIO DELLA MEDICAZIONE

SOFADRESS CAVITARIA deve essere cambiata ogni giorno nei pazienti diabetici e con sistema immunitario compromesso o in presenza di infezione. Compatibilmente alle condizioni del paziente e al livello dell'essudato, può rimanere in situ due o tre giorni. Inizialmente può rendersi necessario il ricambio della medicazione anche più volte al giorno, a causa dell'incremento dell'essudato che si osserva normalmente durante i primi giorni. La medicazione complementare esterna di **SOFADRESS** va ispezionata frequentemente per accertarne il grado di saturazione dell'essudato che, quando raggiunge il 75% indica l'immediato ricambio dell'intera medicazione, interna ed esterna. Per quanto possibile bisogna impedire che l'essudato trapeli oltre il bordo della ferita, sulla cute circostante, per evitare il rischio di macerazione del tessuto sano.

Tra un ricambio e l'altro, salvo casi particolari (es.: contaminazione, infezione) o parere medico, è sconsigliabile detergere o irrigare il letto della ferita con soluzione fisiologica e tanto meno con soluzioni disinfettanti. La pulizia fisica della ferita potrebbe nuocere al processo di rigranulazione cellulare e ritardarne la guarigione.

PRECAUZIONI

Assicurarsi che la medicazione complementare sia stata applicata correttamente. Non usare la medicazione su pazienti con accertata sensibilità al poliuretano in pellicola o schiuma. Per la detersione della ferita non bisogna usare soluzioni ossidanti, come ipoclorito e acqua ossigenata, che danneggerebbero la schiuma di poliuretano.

SOFADRESS è destinata ad essere usata sia dal personale sanitario che dai pazienti.

SOFADRESS va impiegata una sola volta e gettata dopo l'uso. Non riutilizzare per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

CONSERVAZIONE


SOFADRESS va mantenuto in luogo fresco ed asciutto e lontano dalla luce.

SMALTIMENTO

Per uso ospedaliero si suggerisce di smaltire seguendo le procedure in vigore.

NON CONTIENE LATTICE NÈ PRODOTTI ANIMALI – NON È RIUSABILE – NON È RISTERILIZZABILE – NON USARE SE LA BUSTA DELLA MEDICAZIONE PRESENTA ROTTURE O È APERTA – USARE ENTRO LA DATA STAMPATA SULLA CONFEZIONE.

Ultima revisione effettuata in data: Settembre 2019.

 SOFAR S.p.A.
Via Firenze, 40
20060 Trezzano Rosa MI

 0476

 Numero Verde
800-393346



03002712